



A SMALL PART OF A BIGGER LIFE.



イーキンジャパン総合カタログ

皆様により良いサービスを提供いたします

目次

はじめに	1-2
[ストーマ装具]	
eakin dot [®] イーキンドットについて	3
eakin dot [®] イーキンドット ドレナブル	4-5
eakin dot [®] イーキンドット イレオコンベックス	6-7
eakin dot [®] イーキンドット ツーピース	8-9
イーキンパウチ ドレナブル(消化管用)	10
イーキンパウチ ウロ(尿路系)	11
イーキンパウチ 小児・新生児用	12
[皮膚保護シール&アクセサリ]	
Cohesive [®] イーキンシール	14-15
イーキンfreeseal [®] フリーシール	16
イーキンCohesive [®] ペースト	17
Release [™] リリースリムーバー (粘着剥離剤)	18
Protect [™] プロテクトバリアフィルム (皮膚被膜剤)	19
Perform [™] パフォームジェル (凝固剤)	20
Surround [™] サラウンド スキンプロテクター	21
索引(製品コード順)	22-24
お問合せ先	25



はじめに

イーキンジャパンは日本のお客様の期待にお応えします

イーキンジャパン株式会社は、アイルランドに本社を置くTG Eakin社の日本法人です。おかげさまで設立以来順調に取り扱い製品を増やし総合的なオストミーケアの会社として日本のお客様に受け入れていただけるまでになりました。イーキンの名を冠した製品は、長年にわたり日本のお客様にもお使いいただいておりますが、日本の看護に携わる皆様、医療機関様、販売店様そしてオストメイトの皆様に、より身近にサービスを提供するため、2015年にイーキンジャパンが設立されました。私たちは、全国をカバーする営業ネットワークを構築し、東京に学術・カスタマーサポートの拠点を置いて活動しております。

私たちは、日本に根付いた会社であることを誇りに思います。日本のオストメイトのニーズを理解して、日本のために特別にデザインされた製品と親身なサービスを通じて皆様の期待にお応えします。

あくなき品質の追求

世界中に知られ30年以上にわたり40か国以上で愛用されているCohesive®イーキンシールをはじめとして、日本のイレオストミーケアのために装具装着期間の延長と皮膚への優しさを両立した最新のハイドロコロイド、*skinsmart*®用いて開発されたイーキンドットイレオコンベックスに至るまで、イーキンは、長年にわたり科学的・臨床的な裏付けのある最高品質の製品を提供しつづけていることを評価されてきました。

イーキンのこころ

私たちはすべてのオストメイトが尊重され最善のケアを受けるに値すると考えます。

オストメイトの皆様が自信をもって毎日を過ごしていただけるようにストーマケアに最高水準の革新をもたらすことが、私たちが自らに課した使命であり、そのことで私たちは評価されなければなりません。家族を大切にすることが私たちの社風の中核にあります。イーキンは創業者がオストメイトである自らの家族の一人を助けるためにイーキンシールを開発したことに始まりました。その社風を受け継ぎ、イーキンジャパンは、最高のサポートおよび製品を通じ、全てのお客様によりよいサービスを提供してまいります。



植木俊哉
ジェネラルマネージャー
イーキンジャパン株式会社



ジェレミー イーキン
マネージングディレクター
TG Eakin Ltd

植木俊哉





イーキンは一歩があなたの人生を左右すべきではないと考えます。

一歩はあなたの人生におけるちょっとしたものにすぎません。

その信念に基づき、私たちは、私たちのお客様が苦労せず、幸せに、そして自分自身を最大限に活かして人生を送れるように、革新的な製品の開発に努力しています。

私たちは魔法使いではありません。しかし、なにかを良くしたり、容易にしたり、手間やきまりの悪さや制約、あるいはイライラを減らす方法があるなら、私たちはそれを行います。

いかがですか？ 私たちの製品をご覧ください、サンプルをご用意ください。

ストーマ装具

今、様々な人たちに大きな変化をもたらしています

イーキン®の新しいオストミー製品シリーズ、イーキンドット (eakin dot®)には、どの製品よりも少しでも違った良いものを提供したいという私たちの気持ちが表われています。

イーキンドットシリーズが成し遂げた革新はストーマを持ちながらの暮らしをこれまでと違ったものにしてくれます。

...ストーマが大きくても小さくてもまた高さがなくてもあっても...

...あらゆる体形やサイズにご使用いただけます...

...特別な支援を求めるユーザーの手助けとなる...



イーキン・ドット・シリーズの大きな特徴は、独自の装具装着期間を延ばすスキンスマートハイドロコロイドを使用していることです。

装具装着期間を延ばす *skinsmart*™ ハイドロコロイドには3つの特徴があります。



高い初期粘着力

イーキン独自の調合による装具装着期間を延ばす *skinsmart*™ ハイドロコロイドは皮膚にすみやかに密着し、装具交換に時間をかけることなく一日をすぐに始められます。



装具装着期間の延長

装具装着期間を延ばす *skinsmart*™ ハイドロコロイドは、長期間皮膚にしっかりと密着し、厳しい状況でも耐久性を示します。



安心と快適さ

しっかりと皮膚に密着し、追従性と皮膚への優しさをもつハイドロコロイドです。



さらに! 利用者の皆さんから、**皮膚により優しい**という声が届いています。¹

eakin
dot®

イーキン dot® ドット ドレナブル



人生を楽しくあなたの時間をもっと快適に

1. 装着期間を延ばした皮膚に優しいストーマ装具で、
あなたの**時間をもっと快適に**。^{1,2}

skinsmart™ スキンスマートハイドロコロイドなら装具装着期間を延長し、パウチ交換の頻度を減らして時間の節約が期待できます。^{1,2}



「人生が変わりました。」フランスの利用者¹

2. 皮膚に優しいハイドロコロイドでストーマ周囲の皮膚を健全に保護し、
あなたの**時間をもっと快適に**。^{1,2}

skinsmart™ スキンスマートハイドロコロイドは皮膚に優しく、ストーマ周囲の皮膚の状態を管理し改善することを狙います。漏れや表皮剥離によるストーマ周囲の皮膚トラブルを避けることができれば時間を取り戻せます。^{1,2}



「わたしは敏感肌なのですが、問題を感じていません。」オランダの利用者²

さらなる特徴として:

- スリットが入った面板で様々な腹壁に追従
- 実績のあるコンベックスは高い柔軟性があり、さらに安心感をもたらします。圧迫潰瘍を起こしにくい凸の柔軟性で安心してご使用いただけます
- 装着感が快適で、軽やかな着け心地です



イーキンドット ドレナブルコンベックス (CPBS系、貼付期間の目安:3-5日*、凸の高さ6mm)

製品コード	パウチサイズ	孔径サイズ	入数	希望小売価格(非課税)	
840201	標準	窓付き	フリーカット 15-40mm	10枚	¥9,500
840201NF	標準	透明	フリーカット 15-40mm	10枚	¥9,500
840202	マキシ	窓付き	フリーカット 15-40mm	10枚	¥9,500
840203	マキシ	窓付き	フリーカット 15-60mm	10枚	¥11,900
840203NF	マキシ	透明	フリーカット 15-60mm	10枚	¥11,900
840204	標準	窓付き	20mm	10枚	¥9,500
840206	標準	窓付き	25mm	10枚	¥9,500
840208	標準	窓付き	30mm	10枚	¥9,500
840210	標準	窓付き	35mm	10枚	¥9,500
840212	標準	窓付き	40mm	10枚	¥9,500



イーキンドット ドレナブルフラット (CPBS系、貼付期間の目安:3-5日*)

製品コード	パウチサイズ	孔径サイズ	入数	希望小売価格(非課税)	
840301	標準	窓付き	フリーカット 15-55mm	10枚	¥6,100
840301NF	標準	透明	フリーカット 15-55mm	10枚	¥6,100
840302	マキシ	窓付き	フリーカット 15-55mm	10枚	¥6,100
840303	マキシ	窓付き	フリーカット 15-70mm	10枚	¥6,100
840303NF	マキシ	透明	フリーカット 15-70mm	10枚	¥6,100
840304	標準	窓付き	20mm	10枚	¥6,100
840306	標準	窓付き	25mm	10枚	¥6,100
840308	標準	窓付き	30mm	10枚	¥6,100
840310	標準	窓付き	35mm	10枚	¥6,100
840312	標準	窓付き	40mm	10枚	¥6,100



排出口の使い方



両側のマジックテープを剥がします。



一方向に巻き下ろします。



タブをつまみ排出口を大きく広げます。

オストミーベルト

イーキンのソフトコンベックスをより使いやすくするためにこちらの製品も検討ください

製品コード	サイズ	入数	希望小売価格(税込)
839520	標準(100cmまで)	1本	¥1,320
839521	大(200cmまで)	1本	¥1,980



* 貼付期間は、排泄物の状態や皮膚の状態および発汗などにより変わります

eakin dot®

イーキンドット イレオコンベックス

日本のイレオストミーケアのために最高を目指して開発されたソフトコンベックス

イーキンドット イレオコンベックスは日本のストーマケアのために最高を目指しました。その4つの理由

1 装着時の高い安心感²

皮膚にやさしく5日間の貼付が期待でき、管理困難な症例にも安心です。

- ✓ 装具装着期間を延ばす新開発の *skinsmart™* ハイドロコロイド
- ✓ 抜きん出た安心感、強い初期タック、延長された装具装着期間¹

2 柔らかさ² と快適さ^{4,5}

発泡樹脂に裏打ちされたしなやかでクッション性のある面板が、術直後のストーマや細心のケアを要するストーマに適します。

- ✓ 圧迫潰瘍を起こしにくい面板の構造と形状
- ✓ 腹壁の形状に自然になじみ、漏れのリスクを減らします

3 使い易い排出口^{4,5}

大きく柔らかい排出口基部を絞れば、排出時の流れをコントロールして容易に装具を空にできます。大口径の排出口はドレナージチューブに接続でき入院時や在宅での使用に適します。

- ✓ 柔らかくて絞り易い
- ✓ 確実に閉鎖できます

4 唯一の60mmフリーカット

イーキンドット イレオコンベックスは60mmのワイドなフリーカットもご用意しておりストーマが安定するまでの術直後やサイズの大きくなってしまったストーマにも適します。^{6,7,8}

- ✓ クラス最大の孔径
- ✓ ストーマサイズの変化に合わせてプレカットへの移行も可能

ユーザーの声“面板はしっかり密着し快適でした。これまで硬い面板の製品では困ったことが多かったのですが、この製品では皮膚のトラブルは経験しませんでした。”

ユーザーの声“膨らみのあるところ(排出口基部)を押せば固い排泄物でも楽に排出できました。これは良いです。”



イーキンドット イレオコンベックスのユーザー評価(日本)³

95%*の方が装着時の安心感を評価 (n=43)

95%*の方が装着時の快適さを評価 (n=40)

95%*の方が排出し易さを評価 (n=41)

76%の方が従来の装具に替えて選択したい (n=49)

フリーカット



プレカット



イーキンドット イレオコンベックス (CPBS系、貼付期間の目安:3-5日**、凸の高さ6mm)

製品コード	孔径	入数	希望小売価格(非課税)
841000NF	フリーカット 12-40mm	透明 10枚	¥9,500
841001NF	フリーカット 15-60mm	透明 10枚	¥11,900
841002NF	20mm	透明 10枚	¥9,500
841004NF	25mm	透明 10枚	¥9,500
841005NF	27.5mm	透明 10枚	¥9,500
841006NF	30mm	透明 10枚	¥9,500
841008NF	35mm	透明 10枚	¥9,500

オストミーベルト

製品コード	サイズ	入数	希望小売価格(税込)
839520	標準(100cmまで)	1本	¥1,320
839521	大(200cmまで)	1本	¥1,980



*%:5段階評価において上位3以上に評価した対象者の比率
** 貼付期間は、排泄物の状態や皮膚の状態および発汗などにより変わります

eakin
dot®

イーキンドット ツーピース

柔らかい凸面も平面もご用意しております

より快適でよりしっかりしたサポート フレキシブルで、柔らかな凸面¹

- ✓ 柔らかさを追求してデザインされ、潰瘍のリスクとなる圧迫点はありません。
- ✓ さらに快適さを提供します。¹
- ✓ 体型にあわせて柔軟にフィットします。¹
- ✓ ストーマの周りによりしっかりしたサポートを提供。¹



イーキンドットツーピースの3つのユニークなイノベーション

イーキンドットツーピースは、お客様の抱える問題や不安を減らし、少しでもお客様が暮らしやすいようにと考えて開発されました。

安心で素早く簡単に交換でき、快適に装着できるための3つのユニークなイノベーションがあります。



紫のガイドリング

「ポップアップ」フランジ上の紫のガイドリングは、明るく見やすくリングとタブの位置が簡単に確認でき、バッグをより容易に素早く交換できます。



装具装着期間を延ばす skinsmart® ハイドロコロイド

すばやく皮膚に密着し装具装着期間を延長する skinsmart® ハイドロコロイドにより、ここぞという場面でも安心です。発泡樹脂で裏打ちされ6つのスリットの入ったフランジが快適性と追従性をもたらします。



「ピールダウン」式

密閉すると「パチッ」と音が鳴る安心できるカップリングを用い、バッグの交換は「ピールダウン」式です。コントロールが容易で、こぼれを減らし、どの向きからでも素早くバッグを装着できます。

装着と取り外しの簡単な3つのステップ

装着の仕方



取り外し方



製品特徴の動画
はこちらから

イーキンドット ツーピース コンベックスベースプレート (CPBS系、貼付期間の目安:3-5日*、凸の高さ6mm)

製品コード	孔径	リングサイズ	入数 (枚)	希望小売価格 (非課税)
839820	フリーカット 15-40mm	60mm	5枚	¥4,550
839821	20mm	60mm	5枚	¥4,550
839823	25mm	60mm	5枚	¥4,550
839825	30mm	60mm	5枚	¥4,550
839827	35mm	60mm	5枚	¥4,550
839829	40mm	60mm	5枚	¥4,550
839830	フリーカット 15-60mm	80mm	5枚	¥5,200



イーキンドット ツーピース フラットベースプレート (CPBS系、貼付期間の目安:3-5日*)

製品コード	孔径	リングサイズ	入数	希望小売価格 (非課税)
839800	フリーカット15-37.5mm	60mm	5枚	¥4,000
839801	20mm	60mm	5枚	¥4,000
839803	25mm	60mm	5枚	¥4,000
839805	30mm	60mm	5枚	¥4,000
839807	35mm	60mm	5枚	¥4,000
839809	フリーカット15-50mm	80mm	5枚	¥4,000
839810	40mm	80mm	5枚	¥4,000
839811	45mm	80mm	5枚	¥4,000
839812	50mm	80mm	5枚	¥4,000



イーキンドット ツーピース ドレナブルバッグ

製品コード	パウチサイズ	リングサイズ	入数	希望小売価格 (非課税)
839903	ミニ	60mm	窓付き 10枚	¥4,000
839904	標準	60mm	窓付き 10枚	¥4,000
839905	マキシ	60mm	窓付き 10枚	¥4,000
839922	標準	80mm	窓付き 10枚	¥4,000
839923	マキシ	80mm	窓付き 10枚	¥4,000



イーキンドット ツーピース クローズドバッグ

製品コード	パウチサイズ	リングサイズ	入数	希望小売価格 (非課税)
839900	ミニ	60mm	窓付き 10枚	¥3,600
839901	標準	60mm	窓付き 10枚	¥3,800
839920	標準	80mm	窓付き 10枚	¥3,800



オストミーベルト

製品コード	サイズ	入数	希望小売価格 (税込)
839520	標準 (100cmまで)	1本	¥1,320
839521	大 (200cmまで)	1本	¥1,980



*貼付期間は、排泄物の状態や皮膚の状態および発汗などにより変わります

1. eakin dot® 2-piece user evaluations, Data on File, 2019.

eakin[®] pouches

イーキンパウチ

ソフトコンベックスパウチもフラットパウチも**最高の快適さ**とストーマ周囲に心地よくフィットするようデザインされています。

- ・ 幅広いサイズのプレカットとフリーカットがしっかりと密着し装着期間を延ばします。
- ・ 肌触りの柔らかい不織布が、静音性と快適さを提供します。
- ・ 不織布の切れ目を上下に開ければ、簡単に正確にストーマの位置と状態を確認できます。
- ・ 解剖学的に様々な体型にフィットするようデザインされ、服の上からも目立ちません。

イーキンパウチコンベックス

傑出した柔らかさが、快適さと追従性を実現術直後から社会復帰まで幅広く利用頂いています。



イーキンパウチドレナブル(消化管用)

イーキンのドレナブルパウチは、**しっかりしたマジックテープの開鎖具**を用い、清潔に簡単に装具を空にできます。

エアフローを考慮した最新の脱臭フィルターが、臭気を防ぎバルーンニング現象とパンケーキ現象のリスクを最小化します。(入浴時のフィルターシール付き)

イーキンパウチ **コンベックスドレナブル** (CPBS系、貼付期間の目安:2-4日*、凸の高さ6mm)

製品コード	孔径		入数	希望小売価格 (非課税)
839500NF	フリーカット 12-40mm	透明	10枚	¥9,500
839500	フリーカット 12-40mm	窓付き	10枚	¥9,500
839512NF	フリーカット 15-60mm	透明	10枚	¥11,900
839512	フリーカット 15-60mm	窓付き	10枚	¥11,900
839501	20mm	窓付き	10枚	¥9,500
839503	25mm	窓付き	10枚	¥9,500
839505	30mm	窓付き	10枚	¥9,500
839507	35mm	窓付き	10枚	¥9,500
839509	40mm	窓付き	10枚	¥9,500



イーキンパウチ **フラットドレナブル** (CPB系、貼付期間の目安:1-3日*)

製品コード	孔径		入数	希望小売価格 (非課税)
839336	フリーカット 15-65mm	窓付き	30枚	¥18,300

イーキンパウチ フラットプレカット 20・25・30・35mm については受注品となります。ご希望の方はイーキンジャパンへお問い合わせください。



イーキンパウチ ウロ (尿路系)

イーキンのウロストミーパウチは理想的な特徴を有します。柔らかく追従性が高く、**最高の安心**と快適さを提供します。

- 逆流防止弁付き
- 革新的な形状でパウチに残る尿を最小限に抑えます
- 内径の広い排出口が粘液もスムーズに排出

イーキンパウチ コンベックス ウロ (CPBS系、貼付期間の目安:2-4日*、凸の高さ6mm)

製品コード	孔径		入数	希望小売価格(非課税)
839540	フリーカット 12-40mm	窓付き	10枚	¥11,500
839575	フリーカット 15-60mm	窓付き	10枚	¥13,200
839541	20mm	窓付き	10枚	¥11,500
839543	25mm	窓付き	10枚	¥11,500
839545	30mm	窓付き	10枚	¥11,500
839547	35mm	窓付き	10枚	¥11,500
839549	40mm	窓付き	10枚	¥11,500



イーキンパウチ フラット ウロ (CPB系、貼付期間の目安:1-3日*)

製品コード	孔径		入数	希望小売価格(非課税)
839603	フリーカット 15-65mm	窓付き	30枚	¥25,500

イーキンパウチ フラット プレカット 20・25・30・35mm については受注品となります。ご希望の方はイーキンジャパンへお問い合わせください。



ウロ用排出口

接続管 不要

ウロバックをそのまま差し込める柔らかい構造



オストミーベルト

製品コード	サイズ	入数	希望小売価格(税込)
839520	標準 (100cmまで)	1本	¥1,320
839521	大 (200cmまで)	1本	¥1,980



イーキンパウチ小児・新生児用



イーキンの小児用パウチは、成人用パウチと同じ品質に妥協をしていません。小児の皮膚にも優しく、快適さと安心を提供します。

世界で唯一の小児用ソフトコンベックスパウチ

- テディベアのプリント柄の不織布は、スリット入りなので素早くストーマの状態を確認できます。
- ドレナブルパウチは防水シール付きのフィルターが臭いをコントロール。
- 入浴時のフィルターカバーもテディベアのデザインです。
- ドレナブルパウチのマジックテープ付排出口は、素早く簡単にパウチを空にできます。清潔で煩わしさはありません。
- 新生児用パウチにはスターターホールが無いのでお好みの位置に開孔できます。

イーキンパウチ 小児用 コンベックス (CPBS系、貼付期間の目安:2-4日*)

製品コード		孔径サイズ	入数	希望小売価格 (非課税)
839707	コンベックスドレナブル	フリーカット 5-30mm	窓付き プリント柄 10枚	¥10,800
839708	コンベックスウロ	フリーカット 5-30mm	窓付き プリント柄 10枚	¥10,800

イーキンパウチ小児用・新生児用フラット (CPB系、貼付期間の目安:1-3日*)

製品コード		孔径サイズ	入数	希望小売価格 (非課税)
839701	フラットドレナブル	フリーカット 10-50mm	窓付き プリント柄 30枚	¥29,800
839703	フラット新生児用ドレナブル	フリーカット 0-40mm	窓付き プリント柄 30枚	¥29,800
839706	フラットウロ	フリーカット 10-50mm	窓付き プリント柄 30枚	¥29,800



皮膚保護シール & アクセサリ

Cohesive® イーキンシール

科学が裏付ける卓越性とシンプルさ¹¹⁻¹⁴



NEW!
パッケージが新しくなりました

高い吸水性のイーキンシールは水分由来の皮膚損傷(MASD)を防ぎます。¹¹⁻¹⁴その理由は


- 1 **高い吸水性**^{11,12}
- 2 **消化酵素から皮膚をしっかりと保護**^{11,12}
- 3 **刺激物から皮膚を保護**^{11,12}

加えて

自在に成形可能 **曲げたり延ばしたり** ストーマのサイズに合わせて成形できます。¹²

さらに

装具装着期間を**延ば**します^{15,16}

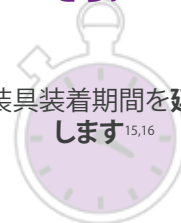

Cohesive®イーキンシールスリム 普段使いに

- 毎日の皮膚保護と安心の確保
- ストーマ装具を頻繁に交換する方

期待できる働き

イーキンシールスリムは、ストーマ周囲に明確な皮膚障害の兆候が無く他にストーマ周囲合併症もないが、説明できない漏れがある場合に、日常的な皮膚保護と安心感を提供します。(参考右写真)



問題の予防



Cohesive®イーキンシールSサイズ しっかりと皮膚を保護したい場合に

- 皮膚を保護する力は最大
- 水様排泄物の量が多い場合

期待できる働き

イーキンシールSサイズは、排泄物による皮膚障害の際に、しっかりとした皮膚保護と高い水分吸収能力を発揮し、漏れの問題を解消し装具の貼付期間を延長します。(参考右写真)



問題の予防

問題の解決



Cohesive®イーキンシールLサイズ 広範囲の皮膚の保護に

- ・ ストーマ周囲の皮膚を最大限にカバー
- ・ 複雑な皮膚障害や凹凸の大きい皮膚に

期待できる働き

イーキンシールLサイズは、広範囲の皮膚のただれや炎症の治癒を促したい時に適します。乾癬にステロイドローションを用いても装具の粘着性に影響を及ぼしません。さらに、シールが装具装着に適した平らで乾いた表面を形成し、装具装着期間も延長されました。(参考右写真)



問題の解決



Cohesive®イーキン ストーマラップ 時間の節約に

- ・ 大型、楕円形または非正円のストーマに最適
- ・ 手先が不自由でも簡単に使える

期待できる働き

イーキンストーマラップは、2連銃式ループストーマのように非正円形のストーマでも最大限の皮膚保護と漏れの防止とともに、時間をかけない簡便な解決を提供します。右写真の症例のように、乳児のストーマの形状とサイズを正確に写し取ることに苦労している母親にとって最適です。



問題の予防

問題の解決



イーキンシールの使い方

イーキンシールスリム イーキンシールSサイズ

- 1 ストーマ周囲の皮膚を清潔にして乾かします。必要に応じてシールを引き延ばしてください
- 2 ストーマにぴったりと密着するようシールの形を整え、ストーマ周囲の皮膚が見えないように貼付します
- 3 普段通りにストーマ装具を装着し、そのまま30秒間手で押さえます

イーキンシールLサイズ

- 1 ストーマ周囲の皮膚を清潔にして乾かします。中心孔がストーマよりも少し大きくなるまで中心孔から外側に向かってシールを巻き上げます
- 2 シールをストーマ周囲に貼ります
- 3 シールがストーマにぴったりと密着してストーマ周囲の皮膚が見えなくなるようストーマに向かって巻き戻します

イーキンストーマラップ

- 1 ストーマ周囲の皮膚を清潔にして乾かします。ストーマラップをストーマ周囲にぴったりと密着するよう巻き付けます。
- 2 ストーマに密着するようシールの両端を重ね、ストーマ周囲の皮膚が見えないように貼付します
- 3 シールの外縁を平らにし、普段通りにストーマ装具を装着します

製品コード	製品名	外径	厚さ	入数	希望小売価格(税込)
839005	Cohesive® イーキンシール スリム	48mm	2.8mm	10枚	¥4,950
839002	Cohesive® イーキンシール Sサイズ	48mm	4.2mm	20枚	¥9,900
839001	Cohesive® イーキンシール Lサイズ	98mm	2.1mm	10枚	¥6,270
839006	Cohesive® イーキンストーマラップ	85mm	3.0mm	10枚	¥5,280

イーキン freeseal[®] フリーシール



凸面型装具との併用のために特別に 開発されたイーキン最薄のシール

凸面装具を使用しまだ漏れがある場合は、次のステップとして皮膚保護剤の使用を検討します。

しかし、高さのないストーマに使用した場合、シールが厚すぎて効果的に押し出すことができないことがあります。イーキンfreeseal[®] フリーシールはその薄さにより、ストーマの高さを効果的に維持することができます。

剥がしやすく装具交換が簡単かつスピーディ

designed for
freedom



毎日

使いやすく毎日の必需品です。
柔軟性があり形成が簡単。



薄さ1.8mm

イーキン最薄のシールは、凸面型装具のフィット感への影響を最小限に抑えました。



取り外しも簡単

剥がすのが簡単です。そのままの形で、糊残りなく剥がすことができます。



吸水力

しっかりと水分を吸収し、漏れを防ぎ、ストーマ周囲の皮膚の保護が期待できます。



自由

凸面型装具のユーザーが自信を持って毎日の生活するために、漏れからの自由を提供します。

製品コード	製品名	幅	厚さ	入数	希望小売価格 (税込)
839007	freeseal [®] フリーシール	48 mm	1.8 mm	10枚	4,950円

イーキン Cohesive[®] ペースト

アルコール非含有の粘着性のあるペースト
ストーマ、創傷、瘻孔のケアに

皮膚にやさしく隙間を埋めて、効果的に漏れを防ぐ

イーキンCohesive[®] ペーストを用いる理由

皮膚の状態と保護は、ストーマや瘻孔にパウチを装着する際や粘着性の被覆材を用いる時に考慮しなければならない重要な要素です。

イーキンCohesive[®] ペーストは、ストーマや瘻孔あるいは創傷周囲の皮膚の凹凸、瘢痕、しわを埋めて最適な表面を形成し、装具や被覆材の貼付を確実にします。

1. 皮膚に優しい充填剤

アルコール非含有で、傷つきやすく損傷した皮膚、過敏な方にも理想的な優しい処方です。

2. 皮膚の表面を平坦にする

ストーマや瘻孔、創傷周囲の皮膚を平坦にし漏れを防ぐバリアを形成します。

3. 皮膚の凹凸やしわや亀裂を埋める

装具装着期間の延長を助けます。

さらに、イーキンCohesive[®] ペーストは、アルコールを含みません

- ✓ 乾燥せず、柔軟性を保ちます。
- ✓ 換えのパウチや被覆材をすぐに貼付できるので時間の節約になります。



ご使用方法

直接皮膚の上に必要な量を絞りだして、指で広げてください。

最適な安心を提供し漏れを防ぐためにCohesive[®]イーキンシール、ストーマ装具、瘻孔や創傷パウチと一緒に使えます。

製品コード	製品名	容量	入数	希望小売価格(税込)
839010	Cohesive [®] ペースト	60g	1本	¥2,409
SP839010	Cohesive [®] ペースト	20g	1本	¥1,507

Release™ リリースリムーバー (粘着剥離剤)



毎回の装具交換を、
すばやく痛みを与えずに

Release™リリースリムーバーはユニークです。

Release™リリースリムーバーは、アルコールフリー、シリコンベースの粘着剥離剤です。
すばやく痛みをあたえずストーマ装具や粘着性の被覆材の剥離ができます。
同時に、粘着剤により繰り返される剥離刺激から皮膚を保護します。

使用する3つの理由

release™リリースリムーバーだけが、次の3つの特徴を持つ粘着剥離剤です。



爽やかな香りで臭いを マスク

ユニークで爽やかなスペアミントの香りが、装具交換中の気になる臭いをマスクします。



皮膚の状態を整え、 潤いを与える

ビタミンE含有で、皮膚の状態を整え潤いをあたえます。ストーマ周囲の皮膚を健全に保つ手助けをします。



肌に優しい

Release™リリースリムーバーは、皮膚に優しく、敏感な方にも用いることができます。

ご使用方法

1



スプレーは辺縁に吹かけ、ワイブは粘着部の辺縁をなぞるように拭き取り数秒間待ちます。

2



必要に応じてこの手順を繰り返しゆっくりと粘着剤を皮膚から剥がします。

3



皮膚の表面に粘着剤が残っている場合は、もう一度ワイブリムーバーでその部位を拭き取ります。



写真のようにキャップの根本を押して下さい。

製品コード	製品名	容量	入数	希望小売価格(税込)
839023	リリーススプレーリムーバー	50ml	1本	¥2,530
839024	リリースワイブリムーバー	-	30包	¥3,300

Protect™ プロテクトバリアフィルム (皮膚被膜剤)



爽やかで、優しい皮膚保護

Protect™プロテクトバリアフィルムのユニークな点

Protect™ プロテクトバリアフィルムは、アルコールフリー、シリコンベースのバリアフィルムです。

Protect™プロテクトバリアフィルムは、皮膚に障害を及ぼす滲出液、びらん、強力な医療用粘着剤から、しっかりと皮膚を保護し、パウチの貼付に最適な皮膚の状態をもたらします。

パウチの皮膚への密着性を高めます。

爽やかなミントの香りとともに、耐久性のある保護被膜を形成してくれます。

使用する3つの理由

Protect™プロテクトバリアフィルムだけが、次の3つの特徴を持つ皮膚被膜剤です。



爽やかな香り

ユニークで爽やかなスペアミントの香り。



皮膚の状態を整え、 潤いを与える

ビタミンE含有で、皮膚の状態を整え潤いをあたえます。ストーマ周囲の皮膚を健全に保つ手助けをします。



肌に優しい

protect™ バリアフィルムは、皮膚に優しく、敏感な方にも用いることができます。

ご使用方法

1



保護する部位を清潔にし、完全に乾かします。

2



バリアフィルムスプレーを吹きかけるか、バリアフィルムワイプで該当部位を軽く拭き取ります。

製品コード	製品名	容量	入数	希望小売価格(税込)
839026	プロテクトバリアフィルムスプレー	50ml	1本	¥2,530
839025	プロテクトバリアフィルムワイプ	-	30包	¥3,300

Perform™

パフォームジェル(凝固剤)

水様便や泥状便の扱いを容易にします。

活動的な日常生活や就寝時にもストーマ装具が安定します。

Perform™パフォームジェルは、イレオストミーや排出量の多いストーマでも活動的な日常生活を取り戻し、就寝時の安心を得られるように開発されました。

Perform™パフォームジェルは、排泄物をゲル化してパウチを安定させます。漏れのリスクと雑音を減らします。ここぞという時に安心と快適を提供します。

Perform™パフォームジェルの消臭力は、特に排出時に気になる臭いを大幅に軽減し、自信を取り戻してくれます。



お使いになる3つの理由



アクティブな日常生活

装具を目立たせず装着期間を延長し、快適に安心してアクティブな日常生活をおくれます。



快適な就寝

就寝中でも装具からの排出やガス抜きを気にする必要がなく、睡眠が妨げられません。



臭いを軽減

臭いを大幅に軽減し自信をもって生活できるようサポートします。

ご使用方法

1



面板開口部からパフォームジェルを1包入れます。

2




排泄口が付いているストーマ装具の場合は、装具を空にするたびにパフォームジェルを入れます。

製品コード	製品名	入数	希望小売価格(税込)
839020	パフォームジェル	60包	¥3,960

Surround™

サラウンドスキンプロテクター

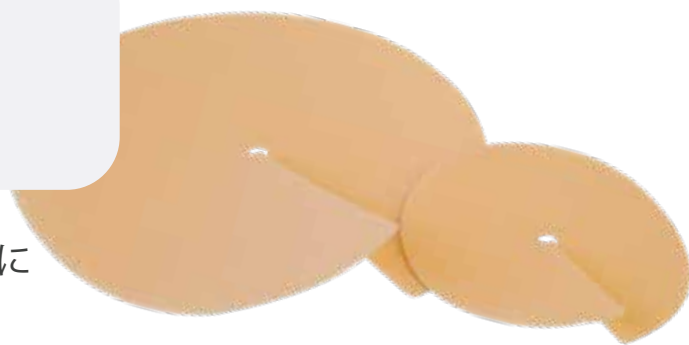

チューブやカテーテル留置部位の皮膚保護に

Surround™サラウンドスキンプロテクターの利点

Surround™サラウンドスキンプロテクターは防水加工により細菌をブロックしてチューブやカテーテル留置部位の皮膚をしっかりと保護します。

Cohesive® イーキンシールと同じ原理に基づき、皮膚に障害をもたらす3つの要素、水分、刺激物および排泄物中の消化酵素に対してバリアを形成します。

- 皮膚への刺激を低減
- しっかりと皮膚を保護
- 快適さの向上
- 漏れを吸収
- 治癒プロセスを促進
- 使い方は簡単

使用用途

Surround™サラウンドスキンプロテクターは、以下の多様な場合の皮膚保護に効果的

- PEGチューブ
- ドレナージチューブ
- Aceチューブ
- 気管切開チューブ
- 恥骨上カテーテル
- ピッグテールカテーテル

ご使用方法

1



周辺部を清潔にし、乾かします。

2



裏紙を剥がします。

3



Surround™サラウンドスキンプロテクターで患部を覆い、両端を重ね合わせてしっかりと密着させます。

4



しっかりと貼り付くまでサラウンドスキンプロテクターの辺縁部を軽く皮膚に押し当てます。

製品コード	製品名	外径	入数	希望小売価格(税込)
839011	サラウンドスキンプロテクター(大)	98mm	10枚	¥7,150
839012	サラウンドスキンプロテクター(小)	58mm	20枚	¥11,000

索引(カテゴリー別)

イーキンドット

製品コード	製品名	仕様	孔径・サイズ	JANコード	掲載ページ
840201		窓付き	フリーカット 15-40mm	4573296405157	5
840201NF		透明	フリーカット 15-40mm	4573296405430	5
840202		窓付き	フリーカット 15-40mm (マキシバッグ)	4573296405164	5
840203		窓付き	フリーカットワイド 15-60mm	4573296405171	5
840203NF	イーキンドットドレナブル	透明	フリーカットワイド 15-60mm	4573296405447	5
840204	コンベックス	窓付き	20mm	4573296405188	5
840206		窓付き	25mm	4573296405201	5
840208		窓付き	30mm	4573296405225	5
840210		窓付き	35mm	4573296405249	5
840212		窓付き	40mm	4573296405263	5
840301		窓付き	フリーカット 15-55mm	4573296405287	5
840301NF		透明	フリーカット 15-55mm	4573296405454	5
840302		窓付き	フリーカット 15-55mm (マキシバッグ)	4573296405294	5
840303		窓付き	フリーカット 15-70mm	4573296405300	5
840303NF	イーキンドットドレナブル	透明	フリーカット 15-70mm	4573296405461	5
840304	フラット	窓付き	20mm	4573296405317	5
840306		窓付き	25mm	4573296405331	5
840308		窓付き	30mm	4573296405355	5
840310		窓付き	35mm	4573296405379	5
840312		窓付き	40mm	4573296405393	5
841000NF		透明	フリーカット 12-40mm	4573296404785	7
841001NF		透明	フリーカットワイド 15-60mm	4573296404853	7
841002NF		透明	20mm	4573296404808	7
841004NF	イーキンドットイレオ	透明	25mm	4573296404815	7
841005NF	コンベックス	透明	27.5mm	4573296404877	7
841006NF		透明	30mm	4573296404822	7
841008NF		透明	35mm	4573296404839	7

製品コード	製品名	仕様	孔径・サイズ	JAN コード	掲載ページ
839800			15-37.5mm (60mm リング)	4573296404563	9
839801			20mm (60mm リング)	4573296404570	9
839803			25mm (60mm リング)	4573296404594	9
839805			30mm (60mm リング)	4573296404617	9
839807	イーキンドット ツーピース フラット ベースプレート		35mm (60mm リング)	4573296404631	9
839809			フリーカット 15-50mm (80mm リング)	4573296404655	9
839810			40mm (80mm リング)	4573296404938	9
839811			45mm (80mm リング)	4573296404945	9
839812			50mm (80mm リング)	4573296404952	9
839820			フリーカット 15-40mm (60mm リング)	4573296405034	9
839821			20mm (60mm リング)	4573296405041	9
839823			25mm (60mm リング)	4573296405058	9
839825	イーキンドット ツーピース コンベックス ベースプレート		30mm (60mm リング)	4573296405065	9
839827			35mm (60mm リング)	4573296405072	9
839829			40mm (60mm リング)	4573296405089	9
839830			フリーカット ワイド 15-60mm (80mm リング)	4573296405096	9
839900	イーキンドット ツーピース クローズドバッグ	窓付き	ミニ (60mm リング)	4573296404662	9
839901		窓付き	標準 (60mm リング)	4573296404679	9
839903	イーキンドット ツーピース ドレナブルバッグ	窓付き	ミニ (60mm リング)	4573296404693	9
839904		窓付き	標準 (60mm リング)	4573296404709	9
839905		窓付き	マキシ (60mm リング)	4573296404716	9
839920	イーキンドット ツーピース クローズドバッグ	窓付き	標準 (80mm リング)	4573296404969	9
839922	イーキンドット ツーピース ドレナブルバッグ	窓付き	標準 (80mm リング用)	4573296404983	9
839923		窓付き	マキシ (80mm リング用)	4573296404990	9

イーキンパウチ

製品コード	製品名	仕様	孔径	JAN コード	掲載ページ
839336	イーキンパウチ フラット ドレナブル	窓付き	フリーカット 15-65mm	4573296400671	10
イーキンパウチ フラット プレカット 20・25・30・35mm については受注品となります。ご希望の方はイーキンジャパンへお問い合わせください。					
839500NF		透明	フリーカット 12-40mm	4573296404747	10
839500		窓付き	フリーカット 12-40mm	4573296401531	10
839512NF		透明	フリーカット ワイド 15-60mm	4573296404754	10
839512	イーキンパウチ コンベックス ドレナブル	窓付き	フリーカット ワイド 15-60mm	4573296401654	10
839501		窓付き	20mm	4573296401548	10
839503		窓付き	25mm	4573296401562	10
839505		窓付き	30mm	4573296401586	10
839507		窓付き	35mm	4573296401609	10
839509		窓付き	40mm	4573296401623	10
839540		窓付き	フリーカット 12-40mm	4573296401784	11
839575		窓付き	フリーカット ワイド 15-60mm	4573296402132	11
839541	イーキンパウチ コンベックス ウロ	窓付き	20mm	4573296401791	11
839543		窓付き	25mm	4573296401814	11
839545		窓付き	30mm	4573296401838	11
839547		窓付き	35mm	4573296401852	11
839549		窓付き	40mm	4573296401876	11
839603	イーキンパウチ フラット ウロ	窓付き	フリーカット 15-65mm	4573296402187	11

イーキンパウチ フラット プレカット 20・25・30・35mm については受注品となります。ご希望の方はイーキンジャパンへお問い合わせください。

索引 (カテゴリー別)

製品コード	製品名	仕様	孔径	JAN コード	掲載ページ
839701	イーキンパウチ フラット ドレナブル 小児用	窓付き	フリーカット 10-50mm	4573296402316	12
839703	イーキンパウチ フラット ドレナブル 新生児用	窓付き	フリーカット 0-40mm	4573296402323	12
839706	イーキンパウチ フラット ウロ 小児用	窓付き	フリーカット 10-50mm	4573296402330	12
839707	イーキンパウチ コンベックス ドレナブル 小児用	窓付き	フリーカット 5-30mm	4573296402347	12
839708	イーキンパウチ コンベックス ウロ 小児用	窓付き	フリーカット 5-30mm	4573296402354	12
839520	オストミーベルト (イーキンストーマベルト) 標準 (100cm まで)			4573296401661	5
839521	オストミーベルト (イーキンストーマベルト) 大 (200cm まで)			4573296401678	5

皮膚保護シール&ペースト

製品コード	製品名	JAN コード	掲載ページ
839001	Cohesive® イーキンシール L サイズ	4573296400015	14
839002	Cohesive® イーキンシール S サイズ	4573296400022	14
839005	Cohesive® イーキンシール スリム	4573296400053	14
839006	Cohesive® イーキン ストーマラップ	4573296400060	14
839007	イーキン freeseal® フリーシール	4573296405614	16
839010	イーキン Cohesive® ペースト 60g	4573296400077	17
SP839010	イーキン Cohesive® ペースト 20g	4573296400084	17

アクセサリー

製品コード	製品名	JAN コード	掲載ページ
839023	リリーススプレーリムーバー	4573296400121	18
839024	リリースワイプリムーバー	4573296400138	18
839025	プロテクトバリアフィルムワイブ	4573296400145	19
839026	プロテクトバリアフィルムスプレー	4573296400152	19
839020	パフォームジェル	4573296400114	20
839011	サラウンド スキンプロテクター (大)	4573296400091	21
839012	サラウンド スキンプロテクター (小)	4573296400107	21

お問合せ先

弊社製品のサンプルをご要望の方は、以下の連絡先までお問い合わせください。
ご購入の際はストーマケア用品販売店様へご注文下さい。



FAX番号: **03-6229-3831**



フリーダイヤル: **0120-983-280**
電話番号: **03-6229-3830**
(受付時間平日9:30~12:00、13:30~17:00)



Eメール: **mail@eakin.co.jp**



または、弊社ウェブサイト (**www.eakin.co.jp/sample**)
からオンライン請求フォームを送信してください。



イーキンジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂5-4-12 TGA AKASAKA 6F

www.eakin.co.jp

Email: mail@eakin.co.jp

Tel:03-6229-3830 / Fax:03-6229-3831

フリーダイヤル: 0120-983-280

(電話受付時間平日 9:30~12:00、13:30~17:00)

 [@eakinjapan](https://twitter.com/eakinjapan)

ご購入の際はストーマケア用品販売店様へご注文下さい

2023年4月現在