



A SMALL PART OF A BIGGER LIFE.



イーキンジャパン総合カタログ

皆様により良いサービスを提供いたします

目次

はじめに	1-2
[ストーマ装具]	
eakin dot [®] イーキンドット ドレナブル	4-5
eakin dot [®] イーキンドット イレオコンベックス	6-7
eakin dot [®] イーキンドット ツーピース	8-9
イーキンパウチ ドレナブル(消化管用)	10
イーキンパウチ ウロ(尿路系)	11
イーキンパウチ 小児・新生児用	12
[皮膚保護シール&アクセサリ]	
Cohesive [®] イーキンシール	14-15
イーキンfreeseal [®] フリーシール	16
イーキンCohesive [®] ペースト	17
Release [™] リリースリムーバー (粘着剥離剤)	18
Protect [™] プロテクトバリアフィルム (皮膚被膜剤)	19
Perform [™] パフォーマンスジェル (凝固剤)	20
Surround [™] サラウンド スキンプロテクター	21
索引 (製品コード・JANコード)	22-24
お問合せ先	25



はじめに

イーキンジャパンは日本のお客様の期待にお応えします

イーキンジャパン株式会社は、アイルランドに本社を置くTG Eakin社の日本法人です。おかげさまで設立以来順調に取り扱い製品を増やし総合的なオストミーケアの会社として日本のお客様に受け入れていただけるまでになりました。イーキンの名を冠した製品は、長年にわたり日本のお客様にもお使いいただいておりますが、日本の看護に携わる皆様、医療機関様、販売店様そしてオストメイトの皆様に、より身近にサービスを提供するため、2015年にイーキンジャパンが設立されました。私たちは、全国をカバーする営業ネットワークを構築し、東京に学術・カスタマーサポートの拠点を置いて活動しております。

私たちは、日本に根付いた会社であることを誇りに思います。日本のオストメイトのニーズを理解して、日本のために特別にデザインされた製品と親身なサービスを通じて皆様の期待にお応えします。

あくなき品質の追求

世界中に知られ30年以上にわたり40か国以上で愛用されているCohesive®イーキンシールをはじめとして、日本のイレオストミーケアのために装具装着期間の延長と皮膚への優しさを両立した最新のハイドロコロイド、*skinsmart*®用いて開発されたイーキンドットイレオコンベックスに至るまで、イーキンは、長年にわたり科学的・臨床的な裏付けのある最高品質の製品を提供しつづけていることを評価されてきました。

イーキンのこころ

私たちはすべてのオストメイトが尊重され最善のケアを受けるに値すると考えます。

オストメイトの皆様が自信をもって毎日を過ごしていただけるようにストーマケアに最高水準の革新をもたらすことが、私たちが自らに課した使命であり、そのことで私たちは評価されなければなりません。家族を大切にすることが私たちの社風の中心にあります。イーキンは創業者がオストメイトである自らの家族の一人を助けるためにイーキンシールを開発したことに始まりました。その社風を受け継ぎ、イーキンジャパンは、最高のサポートおよび製品を通じ、全てのお客様によりよいサービスを提供してまいります。



植木俊哉
ジェネラルマネージャー
イーキンジャパン株式会社



Padraic Dempsey
CEO,
Eakin Healthcare Group



イーキンは一瞬があなたの人生を左右すべきではないと考えます。

一瞬はあなたの人生におけるちょっとしたものにすぎません。

その信念に基づき、私たちは、私たちのお客様が苦勞せず、幸せに、そして自分自身を最大限に活かして人生を送れるように、革新的な製品の開発に努力しています。

私たちは魔法使いではありません。しかし、なにかを良くしたり、容易にしたり、手間やきまりの悪さや制約、あるいはイライラを減らす方法があるなら、私たちはそれを行います。

いかがですか？ 私たちの製品をご覧ください、サンプルをご用意ください。

ストーマ 装具



イーキン・ドット・シリーズの大きな特徴は、独自の装具装着期間を延ばすスキンスマートハイドロコロイドを使用していることです。

装具装着期間を延ばす *skinsmart*™ ハイドロコロイドには3つの特徴があります。



高い初期粘着力

イーキン独自の調合による装具装着期間を延ばす *skinsmart*™ ハイドロコロイドは皮膚にすみやかに密着し、装具交換に時間をかけることなく一日をすぐに始められます。



装具装着期間の延長

装具装着期間を延ばす *skinsmart*™ ハイドロコロイドは、長期間皮膚にしっかりと密着し、厳しい状況でも耐久性を示します。



安心と快適さ

しっかりと皮膚に密着し、追従性と皮膚への優しさをもつハイドロコロイドです。



さらに!利用者の皆さんから、**皮膚により優しい**という声が届いています。

さらなる特徴として:

- ・ スリットが入った面板で様々な腹壁に追従
- ・ 実績のあるコンベックスは高い柔軟性があり、さらに安心感をもたらします。圧迫潰瘍を起こしにくい凸の柔軟性で安心してご使用いただけます
- ・ 装着感が快適で、軽やかな着け心地です



イーキンドット Dreナブル コンベックス (CPbs系、貼付期間の目安:3-5日*、凸の高さ6mm)

製品コード	パウチサイズ		孔径サイズ	入数	希望小売 価格(非課税)
SP840201	標準	窓付き	フリーカット 15-40mm	3枚	¥3,000
SP840201NF	標準	透明	フリーカット 15-40mm	3枚	¥3,000
SP840203	マキシ	窓付き	フリーカット 15-60mm	3枚	¥3,600
SP840203NF	マキシ	透明	フリーカット 15-60mm	3枚	¥3,600
840201	標準	窓付き	フリーカット 15-40mm	10枚	¥9,500
840201NF	標準	透明	フリーカット 15-40mm	10枚	¥9,500
840202	マキシ	窓付き	フリーカット 15-40mm	10枚	¥9,500
840203	マキシ	窓付き	フリーカット 15-60mm	10枚	¥11,900
840203NF	マキシ	透明	フリーカット 15-60mm	10枚	¥11,900
840204	標準	窓付き	20mm	10枚	¥9,500
840206	標準	窓付き	25mm	10枚	¥9,500
840208	標準	窓付き	30mm	10枚	¥9,500
840210	標準	窓付き	35mm	10枚	¥9,500
840212	標準	窓付き	40mm	10枚	¥9,500



イーキンドット Dreナブル フラット (CPbs系、貼付期間の目安:3-5日*)

製品コード		パウチサイズ		孔径サイズ	入数	希望小売 価格(非課税)
SP840301	NEW	標準	窓付き	フリーカット 15-55mm	3枚	¥2,000
SP840301NF	NEW	標準	透明	フリーカット 15-55mm	3枚	¥2,000
SP840303	NEW	マキシ	窓付き	フリーカット 15-70mm	3枚	¥2,000
SP840303NF	NEW	マキシ	透明	フリーカット 15-70mm	3枚	¥2,000
840301		標準	窓付き	フリーカット 15-55mm	10枚	¥6,100
840301NF		標準	透明	フリーカット 15-55mm	10枚	¥6,100
840302		マキシ	窓付き	フリーカット 15-55mm	10枚	¥6,100
840303		マキシ	窓付き	フリーカット 15-70mm	10枚	¥6,100
840303NF		マキシ	透明	フリーカット 15-70mm	10枚	¥6,100
840304		標準	窓付き	20mm	10枚	¥6,100
840306		標準	窓付き	25mm	10枚	¥6,100
840308		標準	窓付き	30mm	10枚	¥6,100
840310		標準	窓付き	35mm	10枚	¥6,100
840312		標準	窓付き	40mm	10枚	¥6,100



排出口の使い方



両側のマジック
テープを剥がし
ます。



一方向に巻き下
ろします。



タブをつまみ
排出口を大きく
広げます。

オストミーベルト

イーキンのソフトコンベックスをより使いやすくするためにこちらの製品も検討ください

製品コード	サイズ	入数	希望小売価格(税込)
839520	標準(100cmまで)	1本	¥1,320
839521	大(200cmまで)	1本	¥1,980



* 貼付期間は、排泄物の状態や皮膚の状態および発汗などにより変わります



イーキンドット イレオコンベックス

日本のイレオストミーケアのために最高を目指して開発されたソフトコンベックス



スリット入りの
面板が新登場

イーキンドット イレオコンベックスは日本のストーマケアのために最高を目指しました。その4つの理由

1 様々な腹壁に追従

スリットが入った面板で様々な腹壁に追従します。

2 柔らかさ² と快適さ^{1,2}

発泡樹脂に裏打ちされたしなやかでクッション性のある面板が、術直後のストーマや細心のケアを要するストーマに適します。

3 使い易い排出口^{1,2}

大きく柔らかい排出口基部を絞れば、排出時の流れをコントロールして容易に装具を空にできます。大口径の排出口はドレナージュチューブに接続でき入院時や在宅での使用に適します。

4 唯一の60mmフリーカット

イーキンドット イレオコンベックスは60mmのワイドなフリーカットもご用意しておりストーマが安定するまでの術直後やサイズの大きくなってしまったストーマにも適します。

窓付タイプと
透明タイプ



使い易い
排出キャップ



袋のタイプは窓付きと透明とを
お好みでお選びいただけます

キャップはしっかりと閉まり、
開ける際はキャップをクルクル
回しながら引き上げます



排出口の使用
動画はこちらから

フリーカット スリット入



3枚入りも
同時発売!



イーキンドット イレオ コンベックス (CPbs系、貼付期間の目安:3-5日*、凸の高さ6mm)

製品コード		孔径		入数	希望小売価格(非課税)
SP851000NF	NEW	フリーカット 15-40mm	スリット入	透明 3枚	¥3,000
SP851000	NEW	フリーカット 15-40mm	スリット入	窓付き 3枚	¥3,000
SP851001NF	NEW	フリーカット 15-60mm	スリット入	透明 3枚	¥3,600
SP851001	NEW	フリーカット 15-60mm	スリット入	窓付き 3枚	¥3,600
SP841000NF		フリーカット 12-40mm		透明 3枚	¥3,000
SP841001NF		フリーカット 15-60mm		透明 3枚	¥3,600
851000NF	NEW	フリーカット 15-40mm	スリット入	透明 10枚	¥9,500
851000	NEW	フリーカット 15-40mm	スリット入	窓付き 10枚	¥9,500
851001NF	NEW	フリーカット 15-60mm	スリット入	透明 10枚	¥11,900
851001	NEW	フリーカット 15-60mm	スリット入	窓付き 10枚	¥11,900
841000NF		フリーカット 12-40mm		透明 10枚	¥9,500
841001NF		フリーカット 15-60mm		透明 10枚	¥11,900
841002NF		20mm		透明 10枚	¥9,500
841004NF		25mm		透明 10枚	¥9,500
841005NF		27.5mm		透明 10枚	¥9,500
841006NF		30mm		透明 10枚	¥9,500
841008NF		35mm		透明 10枚	¥9,500



オストミーベルト

製品コード	サイズ	入数	希望小売価格(税込)
839520	標準(100cmまで)	1本	¥1,320
839521	大(200cmまで)	1本	¥1,980



* 貼付期間は、排泄物の状態や皮膚の状態および発汗などにより変わります

柔らかい凸面も平面もご用意しております

より快適でよりしっかりしたサポート フレキシブルで、柔らかな凸面¹

- ✓ 柔らかさを追求してデザインされ、**潰瘍のリスクとなる圧迫点はありません。**
- ✓ **さらなる快適さ**を提供します。¹
- ✓ 体型にあわせて**柔軟に**フィットします。¹
- ✓ ストーマの周りによりしっかりしたサポートを提供。¹



イーキンドットツーピースの3つのユニークなイノベーション

イーキンドットツーピースは、お客様の抱える問題や不安を減らし、少しでもお客様が暮らしやすいようにと考えて開発されました。

安心で素早く簡単に交換でき、快適に装着できるための3つのユニークなイノベーションがあります。




紫のガイドリング

「ポップアップ」フランジ上の紫のガイドリングは、明るく見やすくリングとタブの位置が簡単に確認でき、バッグをより容易に素早く交換できます。



装具装着期間を延ばす *skinsmart*™ ハイドロコロイド

すばやく皮膚に密着し装具装着期間を延長する *skinsmart*™ ハイドロコロイドにより、ここぞという場面でも安心です。発泡樹脂で裏打ちされ6つのスリットの入ったフランジが快適性と追従性をもたらします。

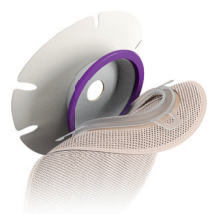

「ピールダウン」式

密閉すると「パチッ」と音が鳴る安心できるカップリングを用い、バッグの交換は「ピールダウン」式です。コントロールが容易で、こぼれを減らし、どの向きからでも素早くバッグを装着できます。

装着と取り外しの簡単な3つのステップ

装着の仕方



取り外し方



製品特徴の動画
はこちらから

イーキンドット ツーピース コンベックスベースプレート (CPbs系、貼付期間の目安:3-5日*、凸の高さ6mm)

製品コード	孔径	リングサイズ	入数(枚)	希望小売価格(非課税)
839820	フリーカット 15-40mm	60mm	5枚	¥4,550
839821	20mm	60mm	5枚	¥4,550
839823	25mm	60mm	5枚	¥4,550
839825	30mm	60mm	5枚	¥4,550
839827	35mm	60mm	5枚	¥4,550
839829	40mm	60mm	5枚	¥4,550
839830	フリーカット 15-60mm	80mm	5枚	¥5,200



イーキンドット ツーピース フラットベースプレート (CPbs系、貼付期間の目安:3-5日*)

製品コード	孔径	リングサイズ	入数	希望小売価格(非課税)
839800	フリーカット15-37.5mm	60mm	5枚	¥4,000
839801	20mm	60mm	5枚	¥4,000
839803	25mm	60mm	5枚	¥4,000
839805	30mm	60mm	5枚	¥4,000
839807	35mm	60mm	5枚	¥4,000
839809	フリーカット15-50mm	80mm	5枚	¥4,000
839810	40mm	80mm	5枚	¥4,000
839811	45mm	80mm	5枚	¥4,000
839812	50mm	80mm	5枚	¥4,000



イーキンドット ツーピース ドレナブルバッグ

製品コード	パウチサイズ	リングサイズ	入数	希望小売価格(非課税)
839903	ミニ	60mm	窓付き 10枚	¥4,000
839904	標準	60mm	窓付き 10枚	¥4,000
839905	マキシ	60mm	窓付き 10枚	¥4,000
839922	標準	80mm	窓付き 10枚	¥4,000
839923	マキシ	80mm	窓付き 10枚	¥4,000



イーキンドット ツーピース クローズドバッグ

製品コード	パウチサイズ	リングサイズ	入数	希望小売価格(非課税)
839900	ミニ	60mm	窓付き 10枚	¥3,600
839901	標準	60mm	窓付き 10枚	¥3,800
839920	標準	80mm	窓付き 10枚	¥3,800



オストミーベルト

製品コード	サイズ	入数	希望小売価格(税込)
839520	標準(100cmまで)	1本	¥1,320
839521	大(200cmまで)	1本	¥1,980



*貼付期間は、排泄物の状態や皮膚の状態および発汗などにより変わります

1. eakin dot® 2-piece user evaluations, Data on File, 2019.

eakin® pouches

イーキンパウチ

ソフトコンベックスパウチもフラットパウチも**最高の快適さ**とストーマ周囲に**心地よくフィット**するようデザインされています。

- ・ 幅広いサイズのプレカットとフリーカットがしっかりと密着し装着期間を延ばします。
- ・ 肌触りの柔らかい不織布が、静音性と快適さを提供します。
- ・ 不織布の切れ目を上下に開ければ、簡単に正確にストーマの位置と状態を確認できます。
- ・ 解剖学的に様々な体型にフィットするようデザインされ、服の上からも目立ちません。

イーキンパウチコンベックス

傑出した柔らかさが、快適さと追従性を実現
術直後から社会復帰まで幅広く利用頂いています。



イーキンパウチドレナブル(消化管用)

イーキンの**ドレナブル**パウチは、**しっかりしたマジックテープの閉鎖具**を用い、清潔に簡単に装具を空にできます。

エアフローを考慮した最新の脱臭フィルターが、臭気を防ぎバルーンニング現象とパンケーキ現象のリスクを最小化します。(入浴時のフィルターシール付き)

イーキンパウチ **コンベックス ドレナブル** (CPbs系、貼付期間の目安:2-4日*、凸の高さ6mm)

製品コード	孔径		入数	希望小売価格(非課税)
839500NF	フリーカット 12-40mm	透明	10枚	¥9,500
839500	フリーカット 12-40mm	窓付き	10枚	¥9,500
839512NF	フリーカット 15-60mm	透明	10枚	¥11,900
839512	フリーカット 15-60mm	窓付き	10枚	¥11,900
839501	20mm	窓付き	10枚	¥9,500
839503	25mm	窓付き	10枚	¥9,500
839505	30mm	窓付き	10枚	¥9,500
839507	35mm	窓付き	10枚	¥9,500
839509	40mm	窓付き	10枚	¥9,500



イーキンパウチ **フラット ドレナブル** (CPb系、貼付期間の目安:1-3日*)

イーキンパウチ フラットについては受注品となります。
ご希望の方はイーキンジャパンへお問い合わせください。

	入数	希望小売価格(非課税)
窓付き	30枚	¥18,300

イーキンパウチ ウロ(尿路系)

イーキンのウロストミーパウチは理想的な特徴を有します。柔らかく追従性が高く、**最高の安心**と快適さを提供します。

- ・ 逆流防止弁付き
- ・ 排出キャップ部に不織布を付け 肌への接触を防ぎます
- ・ 内径の広い排出口が粘液もスムーズに排出

イーキンパウチ コンベックス ウロ (CPbs系、貼付期間の目安:2-4日*、凸の高さ6mm)

製品コード	孔径		入数	希望小売価格(非課税)
839540	フリーカット 12-40mm	窓付き	10枚	¥11,500
839575	フリーカット 15-60mm	窓付き	10枚	¥13,200
839541	20mm	窓付き	10枚	¥11,500
839543	25mm	窓付き	10枚	¥11,500
839545	30mm	窓付き	10枚	¥11,500
839547	35mm	窓付き	10枚	¥11,500
839549	40mm	窓付き	10枚	¥11,500



ウロ用排出口

接続管 不要

ウロバックをそのまま差し込める
柔らかい構造



イーキンパウチ フラット ウロ (CPb系、貼付期間の目安:1-3日*)

イーキンパウチ フラットについては受注品となります。
ご希望の方はイーキンジャパンへお問い合わせください。

	入数	希望小売価格(非課税)
窓付き	30枚	¥25,500

オストミーベルト

製品コード	サイズ	入数	希望小売価格(税込)
839520	標準(100cmまで)	1本	¥1,320
839521	大(200cmまで)	1本	¥1,980



イーキンパウチ小児・新生児用



イーキンの小児用パウチは、成人用パウチと同じく品質に妥協をしていません。小児の皮膚にも優しく、快適さと安心を提供します。

世界で唯一の小児用ソフトコンベックスパウチ


- ・ テディベアのプリント柄の不織布は、スリット入りなので素早くストーマの状態を確認できます。
- ・ ドレナブルパウチは防水シール付きのフィルターが臭いをコントロール。
- ・ 入浴時のフィルターカバーもテディベアのデザインです。
- ・ ドレナブルパウチのマジックテープ付排出口は、素早く簡単にパウチを空にできます。清潔で煩わしさはありません。
- ・ 新生児用パウチにはスターターホールが無いので好みの位置に開孔できます。

イーキンパウチ 小児用 コンベックス (CPbs系、貼付期間の目安:2-4日*)

製品コード		孔径 サイズ	入数	希望小売価格 (非課税)
839707	コンベックスドレナブル	 フリーカット 5-30mm	窓付き プリント柄	10枚 ¥10,800
839708	コンベックスウロ	 フリーカット 5-30mm	窓付き プリント柄	10枚 ¥10,800

イーキンパウチ小児用・新生児用フラット (CPb系、貼付期間の目安:1-3日*)

製品コード		孔径サイズ	入数	希望小売価格 (非課税)
839701	フラットドレナブル	 フリーカット 10-50mm	窓付き プリント柄	30枚 ¥29,800
839703	フラット新生児用ドレナブル	 フリーカット 0-40mm	窓付き プリント柄	30枚 ¥29,800
839706	フラットウロ	 フリーカット 10-50mm	窓付き プリント柄	30枚 ¥29,800

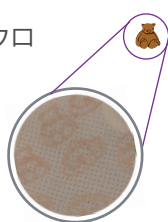

皮膚保護シール & アクセサリ

Cohesive® イーキンシール

業界で先駆けとなったユニークな皮膚保護剤

- ・ 高い吸水力
- ・ 消化酵素活性を抑制
- ・ 高い柔軟性
- ・ 形状維持に優れる
- ・ ゲル化し皮膚に密着



Cohesive®イーキンシールスリム 普段使いに

- ・ 毎日の皮膚保護と安心の確保
- ・ ストーマ装具を頻繁に交換する方



問題の予防



Cohesive®イーキンシールSサイズ しっかりと皮膚を保護したい場合に

- ・ 皮膚を保護する力は最大
- ・ 水様排泄物の量が多い場合



問題の予防 問題の解決



Cohesive®イーキンシールLサイズ 広範囲の皮膚の保護に

- ・ ストーマ周囲の皮膚を最大限にカバー
- ・ 複雑な皮膚障害や凹凸の大きい皮膚に



問題の解決



Cohesive®イーキン ストーマラップ 時間の節約に

- ・ 大型、楕円形または非正円のストーマに最適
- ・ 手先が不自由でも簡単に使える



問題の予防 問題の解決











イーキンシールの使い方

イーキンシールスリム

イーキンシールLサイズ

イーキンストーマラップ

イーキンシールSサイズ

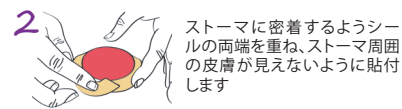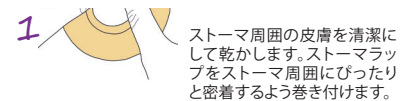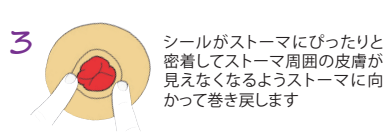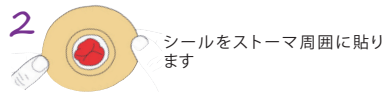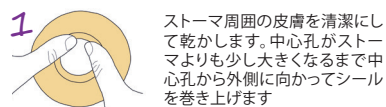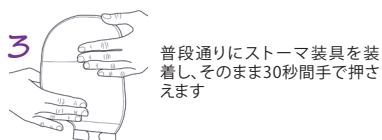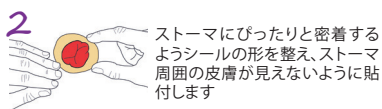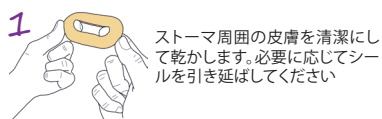

2枚入製品



製品コード	製品名	外径	厚さ	入数	希望小売価格 (税込)
SP839001	Cohesive® イーキンシール Lサイズ	98mm	2.1mm	2枚	¥1,320
SP839002	Cohesive® イーキンシール Sサイズ	48mm	4.2mm	2枚	¥1,210
SP839005	Cohesive® イーキンシール スリム	48mm	2.8mm	2枚	¥1,100
SP839006	Cohesive® イーキンストーマラップ	85mm	3.0mm	2枚	¥1,210
839001	Cohesive® イーキンシール Lサイズ	98mm	2.1mm	10枚	¥6,270
839002	Cohesive® イーキンシール Sサイズ	48mm	4.2mm	20枚	¥9,900
839005	Cohesive® イーキンシール スリム	48mm	2.8mm	10枚	¥4,950
839006	Cohesive® イーキンストーマラップ	85mm	3.0mm	10枚	¥5,280

イーキン freeseal® フリーシール



凸面型装具との併用のために特別に 開発されたイーキン最薄のシール

凸面装具を使用しまだ漏れがある場合は、次のステップとして皮膚保護剤の使用を検討します。

しかし、高さのないストーマに使用した場合、シールが厚すぎて効果的に押し出すことができないことがあります。
イーキンfreeseal® フリーシールはその薄さにより、ストーマの高さを効果的に維持することができます。

剥がしやすく装具交換が簡単かつスピーディ

designed for
freedom



毎日

使いやすく毎日の必需品です。
柔軟性があり形成が簡単。



薄さ1.8mm

イーキン最薄のシールは、凸面型装具のフィット感への影響を最小限に抑えました。



取り外しも簡単

剥がすのが簡単です。そのままの形で、糊残りなく剥がすことができます。



吸水力

しっかりと水分を吸収し、漏れを防ぎ、ストーマ周囲の皮膚の保護が期待できます。



自由

凸面型装具のユーザーが自信を持って毎日の生活するために、漏れからの自由を提供します。

2枚入製品



製品コード	製品名	幅	厚さ	入数	希望小売価格 (税込)
SP839007	freeseal® フリーシール	48 mm	1.8 mm	2枚	¥990
839007	freeseal® フリーシール	48 mm	1.8 mm	10枚	¥4,950

イーキン Cohesive® ペースト

アルコール非含有の粘着性のあるペースト
ストーマ、創傷、瘻孔のケアに



皮膚にやさしく隙間を埋めて、効果的に漏れを防ぐ

イーキンCohesive® ペーストを用いる理由

皮膚の状態と保護は、ストーマや瘻孔にパウチを装着する際や粘着性の被覆材を用いる時に考慮しなければならない重要な要素です。

イーキンCohesive® ペーストは、ストーマや瘻孔あるいは創傷周囲の皮膚の凹凸、瘢痕、しわを**埋めて最適な表面を形成し**、装具や被覆材の貼付を確実にします。

1. 皮膚に優しい充填剤

アルコール非含有で、傷つきやすく損傷した皮膚、過敏な方にも理想的な優しい処方です。

2. 皮膚の表面を平坦にする

ストーマや瘻孔、創傷周囲の皮膚を平坦にし漏れを防ぐバリアを形成します。

3. 皮膚の凹凸やしわや亀裂を埋める

装具装着期間の延長を助けます。

さらに、イーキンCohesive® ペーストは、アルコールを含みません

- ✓ 乾燥せず、柔軟性を保ちます。
- ✓ 換えのパウチや被覆材をすぐに貼付できるので時間の節約になります。



ご使用方法

直接皮膚の上に必要な量を絞りだして、指で広げてください。

最適な安心を提供し漏れを防ぐためにCohesive®イーキンシール、ストーマ装具、瘻孔や創傷パウチと一緒に使えます。

製品コード	製品名	容量	入数	希望小売価格 (税込)
SP839010	Cohesive®ペースト	20g	1本	¥1,507
839010	Cohesive®ペースト	60g	1本	¥2,409

Release™ リリースリムーバー (粘着剥離剤)



毎回の装具交換を、
すばやく痛みを与えずに

Release™リリースリムーバーはユニークです。

Release™リリースリムーバーは、アルコールフリー、シリコンベースの粘着剥離剤です。
すばやく痛みをあたえずストーマ装具や粘着性の被覆材の剥離ができます。
同時に、粘着剤により繰り返される剥離刺激から皮膚を保護します。

使用する3つの理由

release™リリースリムーバーだけが、次の3つの特徴を持つ粘着剥離剤です。



爽やかな香りで臭いを マスク

ユニークで爽やかなスペアミントの香りが、装具交換中の気になる臭いをマスクします。



皮膚の状態を整え、 潤いを与える

ビタミンE含有で、皮膚の状態を整え潤いをあたえます。ストーマ周囲の皮膚を健全に保つ手助けをします。



肌に優しい

Release™リリースリムーバーは、皮膚に優しく、敏感な方にも用いることができます。

ご使用方法

1



スプレーは辺縁に吹かけ、ワイプは粘着部の辺縁をなぞるように拭き取り数秒間待ちます。

2



必要に応じてこの手順を繰り返しゆっくりと粘着剤を皮膚から剥がします。

3



皮膚の表面に粘着剤が残っている場合は、もう一度ワイプリムーバーでその部位を拭き取ります。



写真のようにキャップの根本を押して下さい。



スプレーは逆さにしても噴霧できます

製品コード	製品名	容量	入数	希望小売価格(税込)
839023	リリーススプレーリムーバー	50ml	1本	¥2,530
839024	リリースワイプリムーバー	-	30包	¥3,300

Protect™ プロテクトバリアフィルム (皮膚被膜剤)



爽やかで、優しい皮膚保護

Protect™プロテクトバリアフィルムのユニークな点

Protect™ プロテクトバリアフィルムは、アルコールフリー、シリコンベースのバリアフィルムです。

Protect™プロテクトバリアフィルムは、皮膚に障害を及ぼす滲出液、びらん、強力な医療用粘着剤から、しっかりと皮膚を保護し、パウチの貼付に最適な皮膚の状態をもたらします。

パウチの皮膚への密着性を高めます。

爽やかなミントの香りとともに、耐久性のある保護被膜を形成してくれます。



使用する3つの理由

Protect™プロテクトバリアフィルムだけが、次の3つの特徴を持つ皮膚被膜剤です。



爽やかな香り

ユニークで爽やかな
スペアミントの香り。



皮膚の状態を整え、 潤いを与える

ビタミンE含有で、皮膚の状態を整え潤いをあたえます。ストーマ周囲の皮膚を健全に保つ手助けをします。



肌に優しい

protect™ バリアフィルムは、皮膚に優しく、敏感な方にも用いることができます。

ご使用方法

1



保護する部位を
清潔にし、完全
に乾かします。

2



バリアフィルムスプレーを吹きかけるか、バリアフィルムワイプで該当部位を軽く拭き取ります。

製品コード	製品名	容量	入数	希望小売価格(税込)
839026	プロテクトバリアフィルムスプレー	50ml	1本	¥2,530
839025	プロテクトバリアフィルムワイプ	-	30包	¥3,300

Perform™

パフォームジェル(凝固剤)

水様便や泥状便の扱いを容易にします。

活動的な日常生活や就寝時にもストーマ装具が安定します。

Perform™ パフォームジェルは、イレオストミーや排出量の多いストーマでも活動的な日常生活を取り戻し、就寝時の安心を得られるように開発されました。

Perform™ パフォームジェルは、排泄物をゲル化してパウチを安定させます。漏れのリスクと雑音を減らします。ここぞという時に安心と快適を提供します。

Perform™ パフォームジェルの消臭力は、特に排出時に気になる臭いを大幅に軽減し、自信を取り戻してくれます。



お使いになる3つの理由



アクティブな日常生活

装具を目立たせず装着期間を延長し、快適に安心してアクティブな日常生活をおくれます。



快適な就寝

就寝中でも装具からの排出やガス抜きを気にする必要がなく、睡眠が妨げられません。



臭いを軽減

臭いを大幅に軽減し自信をもって生活できるようサポートします。

ご使用方法

1



面板開口部からパフォームジェルを1包入れます。

2



排泄口が付いているストーマ装具の場合は、装具を空にするたびにパフォームジェルを入れます。

製品コード	製品名	入数	希望小売価格(税込)
839020	パフォームジェル	60包	¥3,960

Surround™

サラウンドスキンプロテクター



チューブやカテーテル留置部位の皮膚保護に

Surround™サラウンドスキンプロテクターの利点

Surround™サラウンドスキンプロテクターは防水加工により細菌をブロックしてチューブやカテーテル留置部位の皮膚をしっかりと保護します。

Cohesive® イーキンシールと同じ原理に基づき、皮膚に障害をもたらす3つの要素、水分、刺激物および排泄物中の消化酵素に対してバリアを形成します。

- ・ 皮膚への刺激を低減
- ・ しっかりと皮膚を保護
- ・ 快適さの向上
- ・ 漏れを吸収
- ・ 治癒プロセスを促進
- ・ 使い方は簡単

使用用途

Surround™サラウンドスキンプロテクターは、以下の多様な場合の皮膚保護に効果的

- ・ PEGチューブ
- ・ ドレナージチューブ
- ・ Aceチューブ
- ・ 気管切開チューブ
- ・ 恥骨上カテーテル
- ・ ピッグテールカテーテル

ご使用方法

1



周辺部を清潔にし、乾かします。

2



裏紙を剥がします。

3



Surround™サラウンドスキンプロテクターで患部を覆い、両端を重ね合わせてしっかりと密着させます。

4



しっかりと貼り付くまでサラウンドスキンプロテクターの辺縁部を軽く皮膚に押し当てます。

製品コード	製品名	外径	入数	希望小売価格 (税込)
839011	サラウンドスキンプロテクター (大)	98mm	10枚	¥7,150
839012	サラウンドスキンプロテクター (小)	58mm	20枚	¥11,000

索引(製品コード・JANコード)

イーキンドット

製品コード	製品名	孔径・サイズ	仕様	入数	JANコード	掲載ページ
SP840201	イーキンドット ドレナブル コンベックス	フリーカット 15-40mm	窓付き	3 枚	4573296405478	5
SP840201NF		フリーカット 15-40mm	透明		4573296405539	5
SP840203		フリーカット ワイド 15-60mm	窓付き		4573296405492	5
SP840203NF		フリーカット ワイド 15-60mm	透明		4573296405546	5
840201	イーキンドット ドレナブル コンベックス	フリーカット 15-40mm	窓付き	10 枚	4573296405157	5
840201NF		フリーカット 15-40mm	透明		4573296405430	5
840202		フリーカット 15-40mm (マキシバッグ)	窓付き		4573296405164	5
840203		フリーカット ワイド 15-60mm	窓付き		4573296405171	5
840203NF		フリーカット ワイド 15-60mm	透明		4573296405447	5
840204		20mm	窓付き		4573296405188	5
840206		25mm	窓付き		4573296405201	5
840208		30mm	窓付き		4573296405225	5
840210		35mm	窓付き		4573296405249	5
840212		40mm	窓付き		4573296405263	5
SP840301	イーキンドット ドレナブル フラット	フリーカット 15-55mm	窓付き	3 枚	4573296405508	5
SP840301NF		フリーカット 15-55mm	透明		4573296405553	5
SP840303		フリーカット 15-70mm	窓付き		4573296405522	5
SP840303NF		フリーカット 15-70mm	透明		4573296405560	5
840301	イーキンドット ドレナブル フラット	フリーカット 15-55mm	窓付き	10 枚	4573296405287	5
840301NF		フリーカット 15-55mm	透明		4573296405454	5
840302		フリーカット 15-55mm (マキシバッグ)	窓付き		4573296405294	5
840303		フリーカット 15-70mm	窓付き		4573296405300	5
840303NF		フリーカット 15-70mm	透明		4573296405461	5
840304		20mm	窓付き		4573296405317	5
840306		25mm	窓付き		4573296405331	5
840308		30mm	窓付き		4573296405355	5
840310		35mm	窓付き		4573296405379	5
840312		40mm	窓付き		4573296405393	5
SP841000NF	イーキンドット イレオ コンベックス	フリーカット 12-40mm	透明	3 枚	4573296404792	7
SP841001NF		フリーカット ワイド 15-60mm	透明		4573296405010	7
SP851000NF	イーキンドット イレオ コンベックス	フリーカット 15-40mm	スリット入 透明	3 枚	4573296405843	7
SP851000		フリーカット 15-40mm	スリット入 窓付き		4573296405829	7
SP851001NF		フリーカット ワイド 15-60mm	スリット入 透明		4573296405850	7
SP851001		フリーカット ワイド 15-60mm	スリット入 窓付き		4573296405836	7
841000NF	イーキンドット イレオ コンベックス	フリーカット 12-40mm	透明	10 枚	4573296404785	7
841001NF		フリーカット ワイド 15-60mm	透明		4573296404853	7
851000NF	イーキンドット イレオ コンベックス	フリーカット 15-40mm	スリット入 透明	10 枚	4573296405805	7
851000		フリーカット 15-40mm	スリット入 窓付き		4573296405782	7
851001NF		フリーカット ワイド 15-60mm	スリット入 透明		4573296405812	7
851000		フリーカット ワイド 15-60mm	スリット入 窓付き		4573296405799	7
841002NF	イーキンドット イレオ コンベックス	20mm	透明	10 枚	4573296404808	7
841004NF		25mm	透明		4573296404815	7
841005NF		27.5mm	透明		4573296404877	7
841006NF		30mm	透明		4573296404822	7
841008NF		35mm	透明		4573296404839	7

製品コード	製品名	孔径・サイズ	仕様	入数	JAN コード	掲載ページ
839800	イーキンドット ツーピース フラット ベースプレート	15-37.5mm (60mm リング)			4573296404563	9
839801		20mm (60mm リング)			4573296404570	9
839803		25mm (60mm リング)			4573296404594	9
839805		30mm (60mm リング)			4573296404617	9
839807		35mm (60mm リング)		5 枚	4573296404631	9
839809		フリーカット 15-50mm (80mm リング)			4573296404655	9
839810		40mm (80mm リング)			4573296404938	9
839811		45mm (80mm リング)			4573296404945	9
839812		50mm (80mm リング)			4573296404952	9
839820		フリーカット 15-40mm (60mm リング)			4573296405034	9
839821	イーキンドット ツーピース コンベックス ベースプレート	20mm (60mm リング)			4573296405041	9
839823		25mm (60mm リング)			4573296405058	9
839825		30mm (60mm リング)		5 枚	4573296405065	9
839827		35mm (60mm リング)			4573296405072	9
839829		40mm (60mm リング)			4573296405089	9
839830		フリーカット ワイド 15-60mm (80mm リング)			4573296405096	9
839900	イーキンドット ツーピース クローズドバッグ	ミニ (60mm リング)	窓付き	10 枚	4573296404662	9
839901		標準 (60mm リング)	窓付き		4573296404679	9
839903	イーキンドット ツーピース ドレナブルバッグ	ミニ (60mm リング)	窓付き	10 枚	4573296404693	9
839904		標準 (60mm リング)	窓付き		4573296404709	9
839905		マキシ (60mm リング)	窓付き		4573296404716	9
839920	イーキンドット ツーピース クローズドバッグ	標準 (80mm リング)	窓付き	10 枚	4573296404969	9
839922	イーキンドット ツーピース ドレナブルバッグ	標準 (80mm リング用)	窓付き	10 枚	4573296404983	9
839923		マキシ (80mm リング用)	窓付き		4573296404990	9

イーキンパウチ

製品コード	製品名	孔径	仕様	入数	JAN コード	掲載ページ
839500NF	イーキンパウチ コンベックス ドレナブル	フリーカット 12-40mm	透明		4573296404747	10
839500		フリーカット 12-40mm	窓付き		4573296401531	10
839512NF		フリーカット ワイド 15-60mm	透明		4573296404754	10
839512		フリーカット ワイド 15-60mm	窓付き		4573296401654	10
839501		20mm	窓付き	10 枚	4573296401548	10
839503		25mm	窓付き		4573296401562	10
839505		30mm	窓付き		4573296401586	10
839507		35mm	窓付き		4573296401609	10
839509		40mm	窓付き		4573296401623	10
839540	イーキンパウチ コンベックス ウロ	フリーカット 12-40mm	窓付き		4573296401784	11
839575		フリーカット ワイド 15-60mm	窓付き		4573296402132	11
839541		20mm	窓付き	10 枚	4573296401791	11
839543		25mm	窓付き		4573296401814	11
839545		30mm	窓付き		4573296401838	11
839547		35mm	窓付き		4573296401852	11
839549		40mm	窓付き		4573296401876	11

イーキンパウチ フラットについては受注品となります。ご希望の方はイーキンジャパンへお問い合わせください。

製品コード	製品名	孔径	仕様	入数	JAN コード	掲載 ページ
839701	イーキンパウチ フラット ドレナブル 小児用	フリーカット 10-50mm	窓付き	30 枚	4573296402316	12
839703	イーキンパウチ フラット ドレナブル 新生児用	フリーカット 0-40mm	窓付き		4573296402323	12
839706	イーキンパウチ フラット ウロ 小児用	フリーカット 10-50mm	窓付き		4573296402330	12
839707	イーキンパウチ コンベックス ドレナブル 小児用	フリーカット 5-30mm	窓付き	10 枚	4573296402347	12
839708	イーキンパウチ コンベックス ウロ 小児用	フリーカット 5-30mm	窓付き		4573296402354	12
839520	オストミーベルト (イーキンストーマベルト) 標準 (100cm まで)			1 本	4573296401661	5
839521	オストミーベルト (イーキンストーマベルト) 大 (200cm まで)				4573296401678	5

皮膚保護シール&ペースト

製品コード	製品名	入数	JAN コード	掲載 ページ
SP839001	Cohesive® イーキンシール L サイズ		4573296405706	14
SP839002	Cohesive® イーキンシール S サイズ		4573296405713	14
SP839005	Cohesive® イーキンシール スリム	2 枚	4573296405720	14
SP839006	Cohesive® イーキン ストーマラップ		4573296405737	14
SP839007	イーキン freeseal® フリーシール		4573296405744	16
839001	Cohesive® イーキンシール L サイズ	10 枚	4573296400015	14
839002	Cohesive® イーキンシール S サイズ	20 枚	4573296400022	14
839005	Cohesive® イーキンシール スリム	10 枚	4573296400053	14
839006	Cohesive® イーキン ストーマラップ	10 枚	4573296400060	14
839007	イーキン freeseal® フリーシール	10 枚	4573296405614	16
SP839010	イーキン Cohesive® ペースト 20g	1 本	4573296400084	17
839010	イーキン Cohesive® ペースト 60g		4573296400077	17

アクセサリ

製品コード	製品名	入数	JAN コード	掲載 ページ
839023	リリーススプレーリムーバー	1 本	4573296400121	18
839024	リリースワイプリムーバー	30 包	4573296400138	18
839025	プロテクトバリアフィルムワイプ	30 包	4573296400145	19
839026	プロテクトバリアフィルムスプレー	1 本	4573296400152	19
839020	パフフォームジェル	60 包	4573296400114	20
839011	サラウンド スキンプロテクター (大)	10 枚	4573296400091	21
839012	サラウンド スキンプロテクター (小)	20 枚	4573296400107	21

お問合せ先

弊社製品のサンプルをご要望の方は、以下の連絡先までお問い合わせください。

ご購入の際はストーマケア用品販売店様へご注文下さい。



FAX番号: **03-6229-3831**



フリーダイヤル: **0120-983-280**

電話番号: **03-6229-3830**

(受付時間平日9:30～12:00、13:30～17:00)



Eメール: **mail@eakin.co.jp**



または、弊社ウェブサイト (**www.eakin.co.jp/sample**)

からオンライン請求フォームを送信してください。



イーキンジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂5-4-12 TGA AKASAKA 6F

www.eakin.co.jp

Email: mail@eakin.co.jp

Tel:03-6229-3830 / Fax:03-6229-3831

フリーダイヤル: 0120-983-280

(電話受付時間平日 9:30~12:00、13:30~17:00)

X (旧 Twitter) @eakinjapan

ご購入の際はストーマケア用品販売店様へご注文下さい